

Apósito Adhesivo Antimicrobiano para Fijación Transparente de Silicona con Clorhexidina y Plata

- **INSTRUCCIONES DE USO:** Siempre consulte las instrucciones de uso antes de la aplicación.



1 Tome la lengüeta de la cubierta protectora azul superior y quite la cubierta.



2 Coloque el adhesivo expuesto sobre la piel y aplane el apósito contra la piel para asegurar una buena adhesión.




3 Tome la lengüeta de la cubierta protectora azul restante y quite la cubierta. Aplane el apósito contra la piel hacia los extremos para asegurar una buena adhesión.



4 Sujete la lengüeta de la protección de papel blanco, retírela cuidadosamente.



5 Aplane el apósito hacia los bordes para asegurar una buena adhesión.

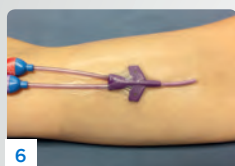

6 Después de aplicar el apósito, Coloque la banda para sujetar aún más el apósito y la tubería de infusión, o para estabilizar el catéter como dictan las buenas prácticas de enfermería.



7 Las bandas opcionales proporcionadas no deben usarse en pacientes con hipersensibilidad conocida o alergia a los adhesivos acrílicos.



8 Registre el cambio de apósito en la banda de documentación de acuerdo con el protocolo de su instalación.



IV Clear™

Frecuencia de Cambio

IV Clear™ proporciona protección antimicrobiana hasta por siete días y permanecerá en su lugar dependiendo del estado del sitio.

Cuidado y Extracción

Examine el apósito todos los días y cámbielo cuando sea necesario, de acuerdo con el protocolo del hospital.

El apósito debe cambiarse según sea necesario:

- Si el vendaje se afloja, se ensucia o se ve comprometido de alguna manera.
- Si el lugar está oculto o ya no está visible.
- Si hay drenaje visible.

Extraiga la etiqueta de documentación y la banda de seguridad del apósito. Para extraer el apósito, levante con suavidad un extremo del apósito y quítelo lentamente.

Disponibilidad

TWBD1014

Video de la Aplicación

AQUÍ

